

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

EMSELLA®



SAY NO TO INCONTINENCE & INTIMATE DISCOMFORT

BTL EMSELLA®

# ПРОТОКОЛ U1

## Стимуляция мышц тазового дна:

- Проприоцептивная нейромышечная фасилитация
- Укрепление мышц
- Релаксация мышц



# ПРОТОКОЛ U1: ПОКАЗАНИЯ

## **N39.3** Стрессовое недержание мочи

- Непроизвольное мочеиспускание

## **N39.4** Другие виды недержания мочи

- Ургентное недержание мочи
- Смешанное недержание мочи
- Недержание мочи у мужчин после простатэктомии

## **N81.8** Слабость мышц тазового дна

## **N81.82** Некомпетентность или ослабление лобково-цервикальных тканей

## **N81.83** Некомпетентность или ослабление ректо-вагинальных тканей

## **N81.84** Атрофия тазовых мышц

- Реабилитация после оперативного лечения пролапса тазовых органов
- Послеродовая реабилитация



# РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОТОКОЛА U1

## КУРС

8-10 процедур

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

28 минут

## ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОЦЕДУР

3 раза в неделю



SAY NO TO INCONTINENCE & INTIMATE DISCOMFORT

**BTL EMSELLA®**

# ПРОТОКОЛ U2

## Интенсивная стимуляция мышц тазового дна:

- Укрепление мышц
- Усиление микроциркуляции
- Релаксация мышц



# ПРОТОКОЛ U2: ПОКАЗАНИЯ

- ❖ Отсутствие медицинских показаний для Протокола U1
- ❖ Профилактика развития дисфункций мышц тазового дна и недержания мочи
- ❖ Сексуальная дисфункция

**F52.2** Недостаточность генитальной реакции

**F52.3** Оргазмическая дисфункция, вторичное гипосексуальное расстройство

**N48.4** Эректильная дисфункция (\*)

**N41.1** Хронический абактериальный простатит (\*)

**R10.2** Хроническая тазовая боль у мужчин и женщин с уточненным генезом боли



# РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОТОКОЛА U2

## КУРС

6-8 процедур

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

28 минут

## ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОЦЕДУР

2-3 раза в неделю



SAY NO TO INCONTINENCE & INTIMATE DISCOMFORT

**BTL EMSELLA®**

# ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- 
- Беременность
  - Электронные имплантированные устройства: кардиостимуляторы, дефибрилляторы, нейростимуляторы, инсулиновая помпа и другие
  - Металлические имплантаты
  - Внутриматочные спирали, содержащие любой металл
  - Менструация
  - Применение в зоне роста кости
  - Недостаточность клапана легочной артерии
  - Тяжелое или угрожающее жизни состояние
  - Болезни сердца острые и хронические в фазе обострения (приступа)
  - Применение у пациентов со склонностью к судорожным припадкам и потерей сознания (артериальная гипотензия, эпилепсия и др.)
  - Лихорадочные состояния
  - Злокачественные опухоли
  - Почечная недостаточность
  - Декомпенсированные\*: геморрагические состояния, нарушения свертывания крови, сердечно-сосудистые заболевания

\* Под декомпенсацией подразумевается состояние пациента с подтвержденным диагнозом заболевания в стадии декомпенсации и длительным приемом лекарственных препаратов. Пациентам, которым ранее не был установлен диагноз заболевания и которые получают медикаментозную терапию в профилактических целях, процедура высокоинтенсивной магнитотерапии не противопоказана.



# ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**Курс терапии для женщин рекомендуется проводить после обследования гинекологом, включая:**

- ❖ сбор анамнеза,
- ❖ специальный гинекологический осмотр,
- ❖ УЗ исследование органов малого таза,
- ❖ цитологическое исследование состояния шейки матки (при наличии исследования давностью менее 1 года – не требуется)
- ❖ исследования мазков на флору и степень чистоты (при наличии исследования давностью менее 1 года, отсутствии жалоб и патологических выделений при осмотре – не требуется),
- ❖ у пациенток старше 35 лет - маммография (при наличии исследования давностью менее 1 года – не требуется).

**Курс терапии для мужчин рекомендуется проводить после обследования урологом**



# ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

- ❖ Врач определяет диагноз и выявляет противопоказания
- ❖ После запуска программы-протокола аппарат работает без участия медперсонала
- ❖ После обучения пациента на первой процедуре не требуется постоянное присутствие медицинского персонала около EMSELLA, но никогда не оставляйте пациента без присмотра и поддерживайте с ним аудиоконтакт.
- ❖ Процедура требует правильного позиционирования и контроля ощущений во время процедуры



# ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

- Убедитесь, что никакие устройства не подключены с EMSELLA к той же розетке
- Обеспечьте правильное позиционирование пациента на кресле-аппликаторе
- Скорректируйте высоту кресла так, чтобы стопы полностью прилегали к поверхности пола
- Угол сгибания коленного сустава должен быть 90 градусов
- Выберите протокол лечения.
- Начните терапию и постепенно увеличивайте интенсивность в течение процедуры

**Интенсивность должна быть адаптирована к состоянию пациента!**

- Увеличивайте и поддерживайте интенсивность воздействия на уровне, который вызывает сильные сокращения мышц, но не вызывают дискомфорт для пациента
- **Лечение никогда не должно причинять боль!**

Если пациент сообщает о сильном дискомфорте, временно уменьшите интенсивность. После лечения пациент может чувствовать легкую мышечную усталость.



# BTL EMSELLA™



**«Лучшая инновационная технология»**  
ESAG 2018, 3-й Всемирный конгресс

ESAG - Европейское общество эстетической гинекологии

BTL®, EXILITE®, EXILIS®, VANQUISH®, UNISON®, CELLUTONE®, EMSCLPT®, EMSCLPT NEO®, EMSELLA®, EMFEMME 360™, EMBODY®, EMTONE® и HIFEM® являются зарегистрированными товарными знаками в Соединенных Штатах Америки, Евросоюзе и/или других странах. Продукты, методы производства или использования могут быть предметом одного или нескольких патентов США или других стран или заявок, находящихся на рассмотрении. Товарные знаки EMSCLPT®, EMSCLPT NEO®, EMSELLA®, EMTONE®, EMBODY®, EMFEMME 360™ и HIFEM® являются частью семейства продуктов EM™.

Не все продукты и показания могут быть лицензированы в вашей стране. Для получения полной информации свяжитесь с местным представителем.

Представитель в Республике Беларусь: «ВАНКВИШ», ООО, ул. Калиновского, д. 77А, офис 136, г. Минск, 220103

тел./факс (+375 17) 360-6010, 360-6080, (+375 29) 389-4900, [btibel@mail.ru](mailto:btibel@mail.ru)



**«Лучшее процедуры в медицинском центре»**  
NewBeauty, 2022



**«Лучшее средство для интимного здоровья»**  
NewBeauty, 2021



**«Лучшая инновация»**  
NewBeauty, 2019

NewBeauty - ведущее издание о красоте, посвященное последним достижениям в области лечебных и косметических процедур.



SAY NO TO INCONTINENCE & INTIMATE DISCOMFORT

# BTL EMSELLA®